

# 【腸内細菌検査】～採取からご提出まで～ vol.1

腸内細菌検査を御提出いただく際のラベル・袋の使用方法和、御依頼書の記入方法についてのご案内です。ご一読いただき、御提出の際など、お役立て下さい。

腸内細菌検査用検体袋		容器貼り付けラベル
企業名 〇〇こども園	所属 K9000001	こちらから容器に貼り付けてください K9000001 - K0221
氏名 〇〇こども園	1 九保 ラボ	〇〇こども園 九保 ラボ 上のラベルを容器に横貼りで貼り付けて袋に入れてください。
131 - 5項目	採取日 月 日	裏の紙をはがし折り曲げて貼り付けてください。

袋の入れ口になっています

御所属の事業所名が入ります。基本的に「企業名」と「所属」は同じです。

提出される個人毎の御名前が入ります。

容器に貼るラベルシール部分です。ここのみ剥がして御使用下さい。

検査項目数を記載しています。必要項目数のものか確認して下さい。

①

「氏名」欄がご自分の名前か、左下の検査項目数が合っているかどうか確認してください。

◆ 予備袋使用の際は上記のように全てご記入下さい ◆

腸内細菌検査用検体袋		容器貼り付けラベル
企業名 〇〇こども園	所属 K9000001	こちらから容器に貼り付けてください K9000001 - K0221
氏名 〇〇こども園	1 九保 ラボ	〇〇こども園 九保 ラボ 上のラベルを容器に横貼りで貼り付けて袋に入れてください。
131 - 5項目	採取日 月 日	裏の紙をはがし折り曲げて貼り付けてください。



②

袋表面のラベル部分のみを容器に縦長に貼ってください。

※おやめください※

- ・袋シール全てを容器に巻く
- ・ラベルをキャップ部分に巻く
- ・ラベルを横長に巻く

ラベルのバーコードが読み込めません



採取方法



◆ 採り方や保存方法・注意事項は、検体用袋の裏面に詳細が記載してございます。

※目視確認できない場合、量不足で結果をお出し出来ない場合があります。

\* ノロウィルス検査は別の専用容器になります \*



⑤

袋裏側の部分のテープをはがして、封をして御提出ください。



④

袋になっております。向かって右側を図のように開き、ラベルを貼った容器を入れてください。

～この袋は捨てずにご利用下さい～